



VOUS AVEZ UN APPAREIL AUDITIF ET VOUS CONNECTEZ VOS AIDES AUDITIVES À VOTRE SMARTPHONE PAR BLUETOOTH

Matériel nécessaire à emprunter à l'accueil:
application ListenEVERYWHERE à télécharger
gratuitement sur votre smartphone

1. Si vous n'avez pas l'application ListenEVERYWHERE sur votre smartphone, téléchargez-la gratuitement depuis l'App Store d'Apple ou Google Play.
2. Entrez en salle 15 minutes avant le début de la représentation
3. Une fois en salle (!) connectez votre smartphone au wifi
TS-GS-LISTEN pour la Grande Salle
TS-PS-LISTEN pour la Petite Salle
il n'y a pas de mot de passe
4. Activez, comme à votre habitude la connexion Bluetooth entre votre téléphone et votre système auditif
5. Réglez le volume avec les touches sur le côté gauche de l'iPod et dans l'application qui gère vos aides auditives